



INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

Uso sin calzado

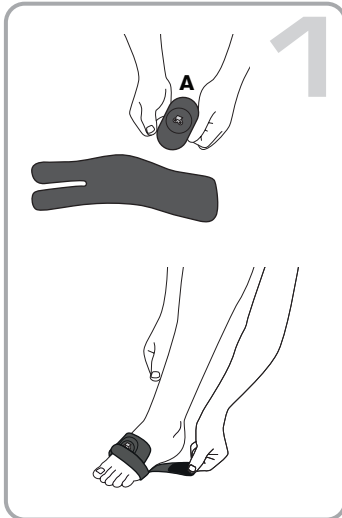


Coloque la placa **A** con el gancho de fijación en la cincha, del lado opuesto al Velcro®, y coloquela en el empeine, asegurando que la placa quede centrada y con el gancho hacia abajo.


Uso con calzado

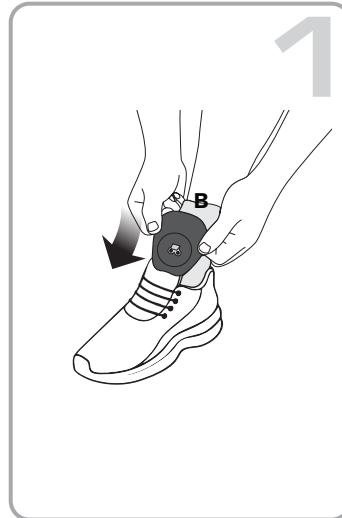


Coloque la placa **B** con el gancho de fijación entre la lengüeta del calzado y los cordones, asegurando que quede centrada y con el gancho hacia abajo.

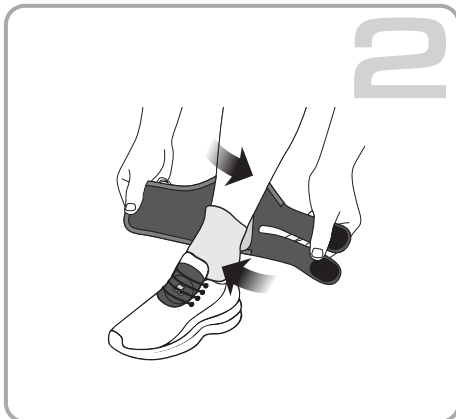


Fije la tobillera por encima de los maleolos haciendo coincidir la almohadilla de gel con el tendón de Aquiles.

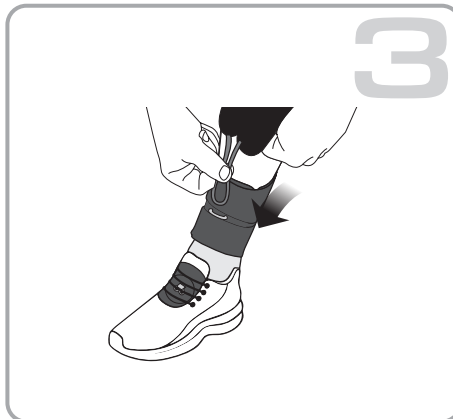

Pase el elástico por la guía situada en el frente de la tobillera.

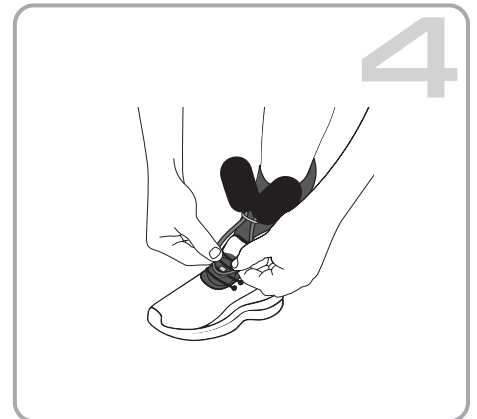

Sujete el elástico con el gancho dejando los extremos con Velcro® libres.

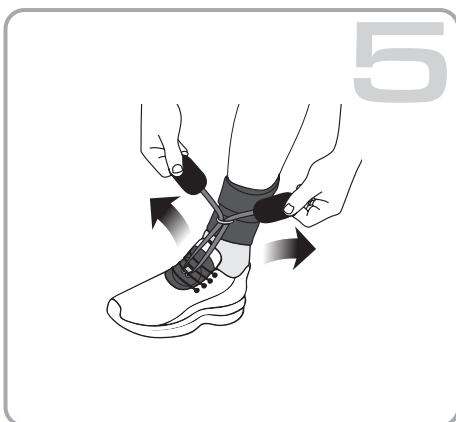

Tire de los extremos del elástico hasta obtener la tracción deseada y asegure con el Velcro® en los laterales de la tobillera.

