
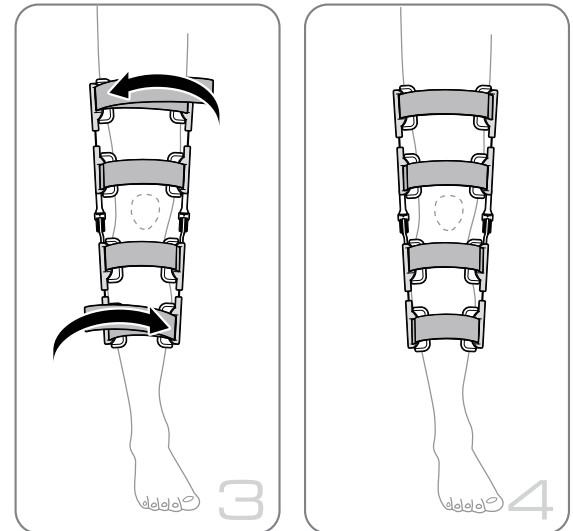


## INSTRUCTIVO DE COLOCACIÓN

1. Desbloquee las bisagras deslizando el botón blanco de bloqueo rápido en dirección opuesta al centro de las bisagras, regule las mismas (*VER AJUSTE DE BISAGRAS*), luego despliegue todas las correas con Velcro®. Coloque el dispositivo con la rodilla (rótula) centrada entre las bisagras. Oriente la rodillera para que las bisagras estén alineadas a la rodilla en la dirección indicada y los brazaletes de la pantorrilla estén hacia los pies. Ejemplo: pierna derecha.
2. En segundo lugar se debe ajustar el dispositivo al largo de la pierna. Sujete ligeramente las 2 correas más cercanas a la rodilla y mientras mantiene las bisagras alineadas con la rodilla, ajuste la posición de los cuatro brazaletes maleables. Presione el botón deslizante y coloque en la posición deseada los dos brazaletes del muslo y luego los dos brazaletes de la pantorrilla.
3. Una vez fijados los brazaletes, sujete ligeramente las 2 correas restantes.
4. Por último, tire de las 4 correas con fuerza para quitar la holgura detrás de la pierna. Tenga cuidado de mantener las posiciones lateral y medial de las barras de las bisagras. Asegure con los Velcros®.

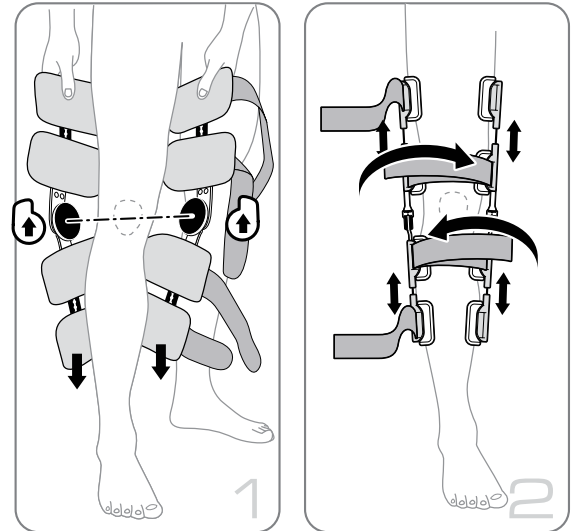

## AJUSTES DE LAS BISAGRAS

- Asegúrese de revisar las órdenes ROM del médico y ajustar la bisagra a esos ajustes.
- Presione el botón de extensión y deslicelo hasta la configuración de ROM deseada. Presione el botón Flexion y deslice hasta la configuración deseada de la ROM.  
*NOTA: Los ajustes de la ROM se bloquean automáticamente en su lugar.*
- La bisagra de bloqueo permite que la abrazadera se bloquee en un ajuste específico. La bisagra se puede bloquear en incrementos de 10° que van desde -10° a 120°. Flexione la pierna al ángulo deseado y enganche el bloqueo. Esto bloqueará la llave en su lugar independientemente de los ajustes de la ROM. Asegúrese de que la configuración de la ROM no interfiera con el ajuste de bloqueo deseado.

