



EL PRODUCTO DEBE SER ADAPTADO POR UN TÉCNICO ORTOPÉDICO O FACULTATIVO.

Una compresión excesiva puede producir intolerancia por lo que aconsejamos regular la compresión hasta el grado óptimo.

A - Ajuste de placa metálica.

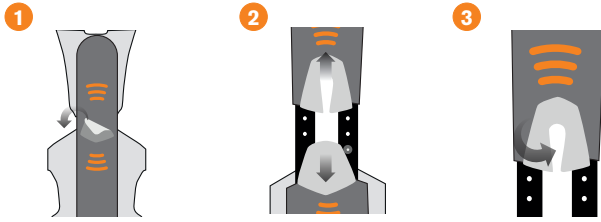

- 1- Despegue el cierre de Velcro® que une ambas partes.
- 2- Separe ambos componentes, retirando la placa metálica del interior de la parte inferior.
- 3- Luego despegue el Velcro® de la parte superior y retire la totalidad de la placa.

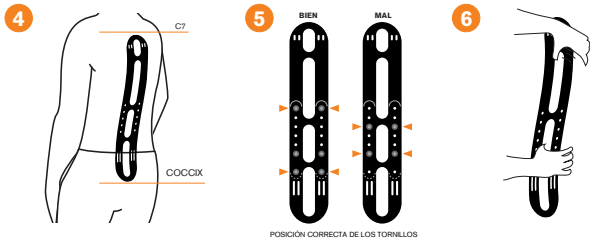

- 4- Con el paciente de pie y firme, posicione la placa a la placa estabilizadora en la espalda del paciente de modo que el borde superior esté aproximadamente 4 cm por debajo de la C7 y el borde inferior esté a nivel del coxis.
- 5- En caso de necesitar ajustar la altura de la placa se deberán quitar los 4 tornillos con una llave allen provista. Deslizar ambas piezas a la altura deseada y volver a fijar todos los tornillos en los extremos de las placas superior e inferior.
- 6- Adapte la placa a la forma anatómica de la columna vertebral del paciente empezando por la lordosis lumbar. No es necesario el uso de herramientas para este proceso.
- 7- Una vez finalizada la adaptación de la placa metálica, deberá introducirla textil superior y cerrar el respectivo Velcro®. Introduzca la parte inferior de la placa en el componente textil inferior y cierre el respectivo Velcro®.

B - Ajuste de las cinchas.

Coloque la ortesis en el paciente, introduciendo los brazos por la apertura de las cinchas y después el cierre abdominal en la zona anterior. Empiece por ajustar la tensión y longitud de las 4 cinchas que conectan esa parte a la placa posterior. Se deberá dar especial atención a las cinchas inferiores.

- 8- Para ajustar el largo de las cinchas:
 - Desenganchar las pinzas de Velcro® que están fijadas en los extremos
 - Cortar las cinchas en la longitud deseada,
 - Volver a enganchar las pinzas de Velcro®.
- 9- Con el paciente de pie y firme deberá ajustar la longitud y tensión de las dos cinchas de hombro de modo que se obtenga una adecuada postura cuando estén fijadas en la zona abdominal.

C - Colocación de la ortesis por el paciente:

Después del ajuste llevado a cabo por el técnico ortopédico, no será necesario mover las posiciones de las cinchas. Para la colocación de la ortesis, apenas se deberán manipular el cierre abdominal.

- 1- Con el cierre abdominal abierto, introduzca los brazos por las aperturas de las cinchas de hombro, como si se tratara de una mochila.
- 2- Introduzca los dedos en los correspondientes pasadores de mano de la parte derecha e izquierda del cierre.
- 3- Presionar el lado izquierdo del cierre sobre el vientre y tirar del lado derecho hasta que se pueda cerrar el Velcro®.
- 4- Ajustar con Velcro® las cinchas

